



スーパー/ウルトラ/エクストラ
6月17日(水) 新発売

特長①

バリアサイドギャザーで染み出しモレ・ムレ低減

特許技術※1

※1 立体ギャザーに、製品バックシートに対し透湿度を調整した液不透過性フィルムを配置した構造。

■ 染み出しモレ：長時間使用後、
ギャザーに体圧がかかると尿が染み出してしまいう現象。


ギャザーに体圧がかかりやすい体勢



■ ギャザー尿の染み出し量(g)


<側臥位>

側臥位で150ml×4回注入時

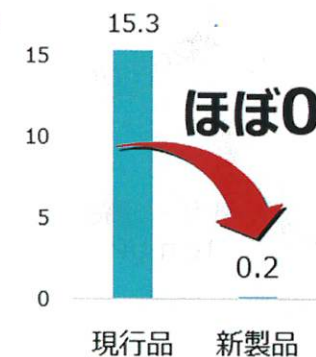


<座位>

仰臥位で150ml×3回
→座位150ml注入時

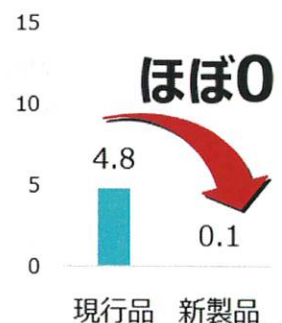

■ バリアサイドギャザーの仕組み

ギャザーに
低透湿フィルム
搭載することで、
モレを防ぎ、
ムレも低減。

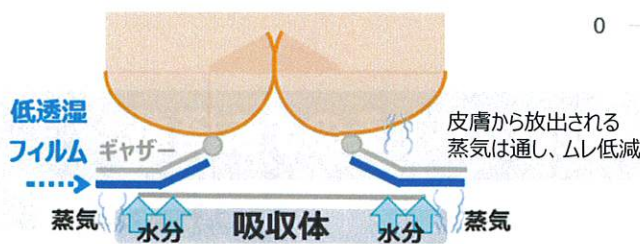

フィルムが水分をカット

ギャザーに体圧がかかりやすい
側臥位・座位姿勢でも
染み出しモレを**ほぼ0**に抑える

データ：ユニ・チャーム調べ

特長②

足回りピタッと吸収体で高齢者の体型にフィット


特許技術※2

※2 吸収性パッドのくびれ部において、前側足回り近辺で吸収体コアの端からパッド外縁までの面積が、後側よりも前側の方が大きい構造。

■ 高齢者体型の特徴

折り紙工学※3を活用し、高齢者の体型を分析。
高齢者体型特有の**内転筋の凸形状**を発見。

※3 3Dスキャンした立体物および3次元CADデータを2次元展開図に変換する方法。

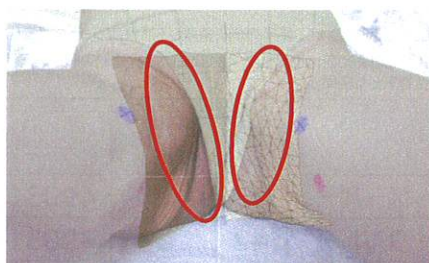


3Dスキャンデータ

■ 形状の違い

独自の足回り構造で
すきまの発生を抑え、
モレを防ぐ。

吸収体の違い
漏れやすい
足回り部分の
吸収体幅を拡張

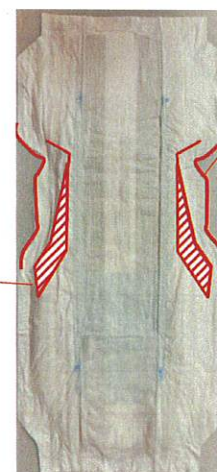

外形の違い
内転筋の
凸形状に
あたる部分は
狭い形状設計


特長③

抗菌シート※4でパッド表面の菌の増殖を抑制

※4 抗菌加工部位での細菌の増殖のみを抑制。全ての細菌を抑制するわけではありません。


■抗菌シート：

これまで抗菌ポリマーが吸収体内でのみ作用。
新製品では表面シート全面の裏側に抗菌剤を塗布し、パッド表面上の菌にも作用。

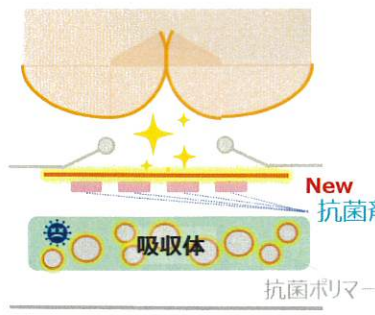

■抗菌剤の効果：試験方法…JIS L 1902

抗菌活性値：無加工品と抗菌加工品における菌数増殖値の差
たとえば6の場合、無加工品に比べて、10⁶つまり
100万分の1に菌の増殖を抑制できているということ。

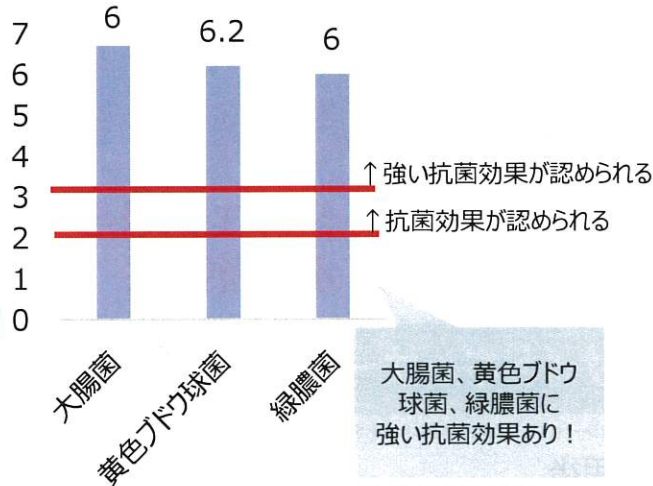

データ：ユニ・チャーム調べ

■抗菌作用：

シャーレ画像比較


【Before】



【After】

抗菌剤なし

抗菌剤あり

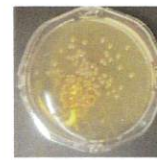


菌がシャーレ全体に広がっている。 抗菌剤により、菌は点在している程度。

実験方法：高齢者尿をガーゼに滴下し、36℃で6時間保管。ガーゼから回収した菌液を培地に撒き、24時間後の増殖を比較。

データ：ユニ・チャーム調べ

エクストラのみ

大判化でさらにモレ安心

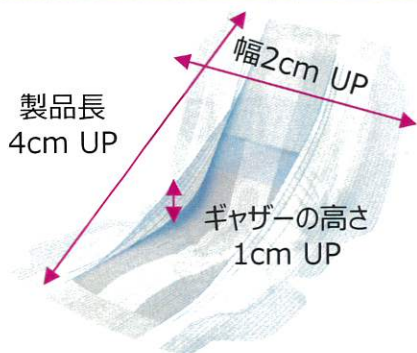

- ライフリーパッド内で最長の64cm
- ライフリーパッド内で最も高い4.5cmのギャザー
- おしり幅広設計

現行品の機能はすべてそのまま搭載

さらさらスライドシート①

肌の動きに合わせて自由に動き、肌への摩擦・ズレを低減。

※5 製品後方部の肌側に低摩擦シート、カバーシートを有し、カバーシートが低摩擦シートの上を滑ることにより身体の動きに追従し、ずれ力を低減する構造。

ドライメッシュシート②

体圧のかかりやすい臀部において、吸収後の尿の逆戻りをほぼ0へ。

※6 製品後方部のドライメッシュシート開口周辺部に表面シート側に向かって突出するリップ部が有ることにより、シート間に空間部が形成され、液戻りした排泄液等を肌に触れにくくする構造。

なみなみシート⑦

不純物を含んだ尿でも、目詰まりを防ぎ、複数回の排尿でもスピード吸収。

※7 湿潤時にも高吸水性を維持できる凹凸シートをトップシートに採用した大人用尿とりパッド。

引き込み吸収ライン③・高速吸収ポリマー

スピード吸収を持続。

超消臭！活性炭シート⑧

高齢者特有の尿臭をスピード吸着。
尿に含まれる便のニオイ成分を約50%低減※9。

※8 中央および側部を空けて、長手方向に連続して活性炭シートを配置した構造。

※9 試験条件：実尿300mlを添加し、40℃で6時間経過時の硫化水素ガス濃度をGC-MS測定し、従来品と比較した結果

商品CD	商品名称	入数 (袋)	入数 (ケース)	JANコード
17969	Gライフリー 一晩中安心さらさらパッドSkin Condition コンフォートナイト スーパー	45	3	4903111029884
85950	Gライフリー 一晩中安心さらさらパッドSkin Condition コンフォートナイト ウルトラ	42	3	4903111793341
82773	Gライフリー 一晩中安心さらさらパッドSkin Condition コンフォートナイト エクストラ	36	3	4903111296095